

## **POCHE URINE DE RECUPERATION**

### **Caractéristiques Techniques**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Corps de la poche:</b>    | réalisé en PVC atoxique, souple et résistant <b>SANS DEHP</b>  |
| <b>Couleur de la poche:</b>  | transparent ou blanche opaque et transparent   |
| <b>Tubulure de la poche:</b> | réalisée en PVC atoxique, transparent, la haute qualité du granule de PVC utilisé confère l'effet «mémoire» à la tubulure face aux pliages éventuels.<br>Longueur de la tubulure : 10 cm |
| <b>Raccord:</b>              | universel, blanche en PVC atoxique   |
| <b>Valve de non-retour:</b>  | étroite, pour éviter le refoulement de l'urine et des gaz  |
| <b>Soudure:</b>              | double, résistance excellente  |
| <b>Points d'attache:</b>     | 4, renforcés pour permettre une fixation stable, par un dispositif adéquat, au lit et des manipulations et transfèrements sûres de la poche.   |
| <b>Graduation:</b>           | asymétrique pour permettre une correcte lecture du liquide contenu   |
| <b>Capacité de la poche:</b> | 2 l.   |
| <b>Stérilisation:</b>        | sur demande, réalisée par un mélange de ETO + CO2  |
| <b>Marque de commerce:</b>   | Securdrain Vià!  |

### **Informations pour l'utilisation**

## **MODE D'EMPLOI**

### **Utilisation**

1. Ouvrez l'emballage et retirez la poche à urine de l'emballage
2. Inspectez et ne pas utiliser si l'emballage individuel est ouvert / endommagé ou si le dispositif est défectueux
3. Conneceter la poche au rubinette de la poche principale

### **Écoulement**

Éliminer conformément aux réglementations nationales et locales sur les déchets médicaux contaminés.


## Stockage

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit sec à température ambiante comprises entre +10 ° C et +35 ° C.

Le produit doit être protégé de la chaleur et de la lumière solaire directe. L'entreposage doit éviter les températures élevées, une forte humidité, sans gaz érosive et avec une bonne aération

La stérilité est assurée pendant 5 ans, sauf si l'emballage est ouvert ou endommagé.

## Dessin Technique

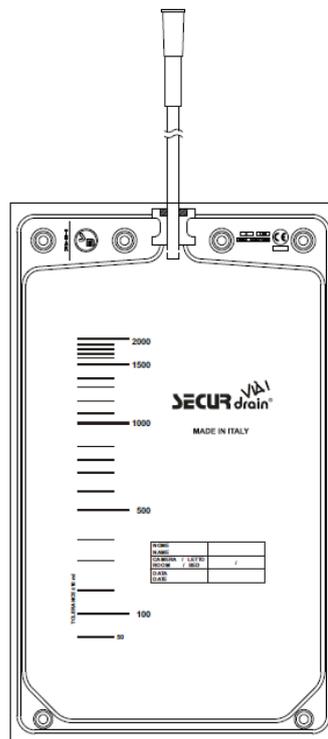

## Codifications et emballage

| <u>CODE</u>  | <u>DESCRIPTION</u>  |                               |
|--------------|---|-------------------------------|
| 008019017107 | POCHE URINE RE RECUPERATION, CAPACITE 2000ML, TUBULURE 10 CM, EN VRAC | 400 PCS CARTON<br>39*29*34 CM |